

Nous vous remercions pour l'achat du thermomètre-figurine à embout flexible de BIOS Diagnostics^{MC}. Pour utiliser tous les avantages de ce thermomètre, il serait utile de vous familiariser avec le mode d'emploi avant d'utiliser pour la première fois ce thermomètre. Conserver ce mode d'emploi pour consultation future.

INDICATIONS D'UTILISATION :

Ce thermomètre numérique (32704) est destiné à mesurer la température corporelle en mode régulier, par voie orale, rectale ou sous l'aisselle. Cet appareil a été conçu pour être réutilisable en clinique ou à domicile, sur des personnes de tous âges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

- Une fièvre élevée et persistante nécessite des soins médicaux surtout chez les jeunes enfants. Le cas échéant, consulter un médecin.
- Ce thermomètre renferme de petites pièces qui peuvent causer des risques d'étouffement. **Ne pas permettre** aux enfants de prendre leur température sans surveillance.
- Conserver la pile à l'écart des enfants, nocive si elle est avalée.
- **Ne pas ouvrir** le thermomètre sauf pour remplacer la pile.
- Afin d'éviter d'endommager la sonde, ne pas la plier à un angle au-delà de 45°.

COMMENT PRENDRE LA TEMPÉRATURE?

1. Choisir la mesure par voie buccale, axillaire (sous l'aisselle) ou rectale selon la région de mesure établie en fonction de la personne. Nettoyer le thermomètre avec de l'eau et du savon avant de l'utiliser
2. Appuyer sur le bouton de fonctionnement situé à côté de la fenêtre d'affichage. Le thermomètre émettra un signal sonore et l'écran affichera **88.8**. Ceci est une vérification de fonctionnement indiquant que le thermomètre fonctionne adéquatement. S'il y avait une mesure mémorisée stockée, elle s'afficherait à l'écran. Tout de suite après s'affichera 37,0 °C / 98,6 °F puis "**LO**" avec °C / °F clignotant et la lettre "M" effacée pour spécifier que le thermomètre est prêt pour la mesure.

IMPORTANT : L'affichage de "**LO**" ne fait pas référence à l'état de charge de la pile.

3. Pendant la mesure de température, le symbole °C/°F clignote aussi longtemps que la température augmente.
4. Un signal sonore (bip) sera émis pendant 10 secondes pour signifier que la température de pointe est atteinte. Si la température est au-dessus de 37,8 °C / 100 °F, des signaux sonores (bips) rapides seront émis pour signifier la présence de fièvre.

NOTE : L'écran ACL affichera "**LO**" si la mesure prise est au-dessous de 32,0 °C / 90 °F. Il affichera "**HI**" si la mesure est au-dessus de 43,0 °C / 109,9 °F.

5. Pour prolonger l'autonomie de la pile, fermer le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton de fonctionnement après chaque utilisation, sinon il se mettra hors tension automatiquement après 9 minutes.
6. Pour commuter le thermomètre de °C à °F, appuyer et tenir enfoncé le bouton de fonctionnement pendant 2 secondes lorsque le thermomètre est hors tension. Le thermomètre se mettra sous tension et soit °C ou °F s'affichera.

USAGE PAR VOIE BUCCALE :

- Avant la prise de température, **il est déconseillé** de prendre une boisson chaude ou froide, de fumer, faire de l'exercice ou des activités quelconques avant la mesure afin d'éviter d'augmenter ou d'abaisser la mesure de température si on la compare à votre température moyenne normale. La bouche doit être fermée pendant 5 minutes avant de prendre une mesure.
- Placer l'embout de la sonde sous la langue et attendre le signal sonore. Aviser les enfants de ne pas mordre la sonde.

USAGE PAR VOIE AXILLAIRE (SOUS L'AISSELLE) :

- Essuyer l'aisselle avec une serviette sèche.
- Placer l'embout de la sonde sous le creux de l'aisselle, ramener le bras le long du corps et attendre le signal sonore.

USAGE PAR VOIE RECTALE :

- Cette méthode est utilisée couramment chez les bébés, les jeunes enfants et lorsqu'il est difficile d'obtenir une lecture de température par voie buccale ou axillaire (sous l'aisselle).
- Lubrifier le thermomètre à l'aide d'un lubrifiant personnel hydrosoluble ou de la gelée de pétrole.
- Insérer délicatement l'embout de la sonde sans dépasser 1,3 cm ou ½ po dans le rectum et attendre le signal sonore.

En cas de résistance, ne pas forcer la sonde dans le rectum.

QU'EST-CE QU'UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE "NORMALE"?

Une température corporelle "normale" varie d'une personne à l'autre et change selon l'heure de la journée et la région corporelle. Le tableau suivant montre les plages de températures :

	Température de fièvre	Plages de températures
Voie rectale*	Plus de 38,0 °C / 100,4 °F	36,6°C – 38°C / 97,8°F – 100,4°F
Voie buccale (bouche) *	Plus de 37,5°C / 99,5°F	35,5°C – 37,5°C / 95,9°F – 99,5°F
Voie axillaire (sous l'aisselle)*	Plus de 37,2 °C / 99 °F	36,5°C – 37,2°C / 97,7°F – 99°F

* Définitions de la fièvre selon la Société canadienne de pédiatrie

RAPPEL D'UNE MESURE EN MÉMOIRE :

Ce thermomètre comporte une mémoire et il peut rappeler la dernière mesure de température. Pour obtenir cette information, le thermomètre hors tension, appuyer sur le bouton de fonctionnement. L'écran affichera 188,8, puis la dernière mesure stockée en mémoire, laquelle sera effacée dès la prise d'une nouvelle mesure de température.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :


Avant et après chaque usage, nettoyer le thermomètre avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux. Désinfecter avec un tampon d'ouate ou un coton-tige humidifié d'alcool. Ne jamais plonger le thermomètre dans l'eau chaude ou dans des solutions nettoyantes abrasives.

REMPLACEMENT DE LA PILE :

Lorsque le symbole  s'affiche à l'écran, la pile est déchargée et doit être remplacée. Retirer le couvercle-figurine du compartiment de la pile à la tête du thermomètre et retirer la pile usée. Insérer une nouvelle pile (LR41. 1,5 V), le signe (+) faisant face vers le bas ou vers l'arrière du thermomètre. Remettre le couvercle du compartiment de la pile.

POUR LES PERSONNAGES CHIEN & VACHE :

- Tirez la tête du personnage vers le haut pour la détacher du corps du thermomètre.
- Vous trouverez un capuchon de sécurité pour la pile. Pour le retirer, utilisez vos deux mains pour exercer une pression de traction (vers l'extérieur) sur le dessus et l'un des clips latéraux afin de le dégager du compartiment à piles.

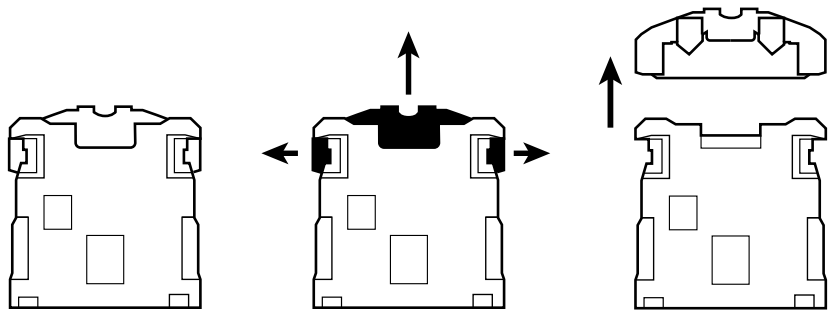

- Remplacez la pile en respectant la polarité correcte.
- Remettez le capuchon de protection de la pile, puis la tête du personnage.

Pour les personnages Lion & Dinosaur :

- Utilisez un mini tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer la vis de sécurité située à l'arrière du thermomètre.
- Tirez la tête du personnage vers le haut pour la détacher du corps du thermomètre.
- Remplacez la pile en respectant la polarité correcte.
- Remettez la tête du personnage, puis revissez la vis de sécurité.

SPÉCIFICATIONS :

Plage de mesure	Entre 32 °C et 42,9 °C (90 °F et 109,9 °F)
Précision :	±0,1 °C, entre 35,5 °C et 42 °C (±0,2 °F, entre 95,9 °F et 107,6 °F)
	±0,2 °C au-dessous de 35,5 °C ou au-dessus de 42 °C (±0,4 °F au-dessous de 95,9 °F ou au-dessus de 107,6 °F) à une température ambiante entre 18 °C et 28 °C (64,4 °F et 82,4 °F)
Environnement opérationnel :	Température : entre 5 °C et 40 °C (41 °F et 104 °F) Humidité relative : 15 % à 95 %
Conditions de stockage et de transport :	Température : -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) Humidité relative : 15 % à 95 %
Type de pile :	1 pile de type LR41 1,5 V
Autonomie de la pile :	Environ 200 heures

 Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet instrument, surtout les directives de sécurité et le conserver pour une consultation future.

 Pièce appliquée de type BF

 Les piles et les appareils électroniques doivent être jetés selon la réglementation locale applicable, non pas avec les déchets domestiques.

 IP22 Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre de plus de 12,5 mm, protection contre les gouttes obliques lors d'une inclinaison maximale de 15 degrés de l'instrument.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Ce thermomètre numérique de BIOS Diagnostics^{MC} comprend une garantie limitée à vie contre les vices de fabrication pendant toute la durée de vie du propriétaire initial. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage ou une altération.

Garantie de satisfaction à 100 %

Si en tout temps vous n'êtes pas entièrement satisfait du rendement de cet instrument, appelez le service d'assistance téléphonique de BIOS Medical et parlez à une personne du service à la clientèle qui prendra les dispositions nécessaires pour que votre appareil soit testé ou remplacé à votre entière satisfaction.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre thermomètre, veuillez appeler **le service d'assistance téléphonique de BIOS Medical : 1 866 536-2289**.

Si une réparation est nécessaire, retournez l'appareil avec toutes ses pièces. Veuillez inclure la preuve d'achat ainsi que 5,00 \$ pour le retour postal et l'assurance. Expédiez l'appareil prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.

Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Veuillez inclure vos nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique. Thermor Ltd. remplacera (au gré de Thermor Ltd.) sans frais, toutes pièces nécessaires pour corriger le défaut de pièce ou de fabrication.

Veuillez allouer 10 jours pour la réparation et le retour d'expédition.



BIOS I Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
 100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %
V. D