

Project Type Instructions	Date: August 1 2022 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH4885 Item Number: SC421 Designer: Allex Vranjesevic	Revision: C	 Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
UPC (For Reference Only)  0 57476 93421 7	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: X N/A:	Artwork is not to be amended or scaled. If any changes are required please send through Thermor office with instructions, and we will amend here and resend artwork through. PLEASE RETURN WITH SIGNATURE	Colour Breakdown 

BIOS living

Pèse-personne électronique en verre
Mode d'emploi
SC421



Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne électronique en verre de BIOS Living. Ce pèse-personne a été mis au point grâce à une technologie de pointe et l'électronique numérique. La précision pondérale de cet appareil est de 330 lb/150 kg. Le pèse-personne est équipé d'un dispositif de mise hors tension automatique.

Caractéristiques :

- Affichage ACL de 3 3/4 po/ 9,5 cm
- Plateforme en verre trempé de haute qualité
- Une pile CR2032 incluse
- Affichage du poids en LB/KG/ST
- Mise hors tension automatique
- Division de 0,2 lb/0,1 kg
- Précis jusqu'à 330 lb/150 kg

Mise sous tension du pèse-personne

1. La pile au lithium (CR2032) est incluse avec votre pèse-personne. Retirez le couvercle du compartiment de la pile derrière le pèse-personne en soulevant la languette. Retirez la pellicule protectrice de la pile.
2. Pour changer l'unité de mesure de LB à KG ou ST, glissez le commutateur situé sur le dessus du pèse-personne à droite à la position désirée.

Fonctionnement

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane. Pesez-vous toujours sur le même pèse-personne déposé sur la même surface.

COMMENTAIRE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse, telle qu'une moquette ou un sol inégal, les résultats pourraient être inexacts ou un message d'erreur pourrait s'afficher.

2. Mettez sous tension le pèse-personne en tapotant légèrement du pied le centre de la plateforme. Dès que le pèse-personne est sous tension et que 0.00 s'affiche à l'écran, montez sur le pèse-personne pour la mesure de votre poids.

3. Lorsque l'affichage clignote, la mesure du poids est terminée. Le pèse-personne se mettra hors tension automatiquement après 10 secondes.

Dépannage

Des codes d'erreur s'afficheront à l'écran pour les raisons décrites ci-dessous.

Project Type Instructions	Date: August 1 2022 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH4885 Item Number: SC421 Designer: Allex Vranjesevic	Revision: C	 Thermor Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
	UPC (For Reference Only)  0 57476 93421 7	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: X N/A:	

Erreur affichée	Raison de ce message d'erreur
	Indicateur de faiblesse de la pile.
	Surcharge – poids au-dessus de la capacité maximale de (337 lb/153 kg/124 st), retirez immédiatement le poids du pèse-personne.

Conseils pour l'utilisation et l'entretien

- Évitez de monter sur la plateforme lorsqu'elle est mouillée – elle sera glissante. Conservez le pèse-personne dans un endroit sec.
- Évitez d'exposer votre pèse-personne à des températures froides ou chaudes extrêmes.
- Évitez les vibrations ou les chocs excessifs à l'instrument.
- Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon humide et évitez toute pénétration d'eau à l'intérieur. N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques.
- N'entrez pas le pèse-personne en position debout quand il n'est pas utilisé ce qui viderait complètement la pile.
- Retirez la pile si le pèse-personne n'est pas utilisé pendant une longue période.

Garantie de cinq ans

Le pèse-personne électronique en verre est garanti contre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre lors d'une utilisation normale pendant 5 ans pour le propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et nécessite une réparation, envoyez-le avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est soumis à une mauvaise utilisation, à la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.



Thermor Ltd.
 16975 Leslie Street,
 Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com

BIOS | Medical
 MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR
THERMOR LTD.
 16975 LESLIE STREET
 NEWMARKET, ON L3Y 9A1
 MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM