


BIOS living™

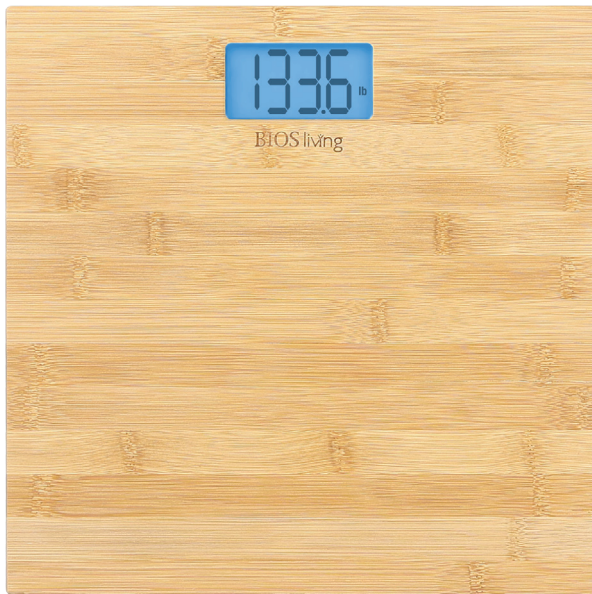

**PÈSE-PERSONNE
NUMÉRIQUE**
en bambou

**Mode d'emploi
SC422**

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne numérique avec plateforme en bambou de BIOS Living™. Ce pèse-personne a été mis au point grâce à l'électronique de pointe. Cet appareil de précision a une capacité pondérale de 397 lb/180 kg et il comporte les fonctionnalités arrêt automatique et réinitialisation à zéro automatiquement.

Caractéristiques

- Écran ACL de 2,91 po x 1,5 po (7,39 x 3,81 cm) avec rétroéclairage bleu
- Plateforme en bambou de 11,81 po x 11,81 po x 0,62 po (30 x 30 x 1,5 cm)
- Précision jusqu'à 397 lb/180 kg
- LG/KG commutable
- Indicateur de faiblesse des piles
- 2 piles AAA incluses
- Arrêt automatique – 8 secondes

Mise en fonction de votre pèse-personne

1. Insérez les piles incluses dans le compartiment de piles situé à la partie supérieure derrière le pèse-personne.

NOTE : Assurez-vous que les piles respectent la polarité afin d'éviter d'endommager le pèse-personne.

2. Avant la mise en marche du pèse-personne, changez l'unité de mesure. Derrière le pèse-personne se trouve un petit bouton marqué **"Unit"**. Appuyez sur ce bouton pour choisir l'unité de mesure.

Mise en marche

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane (évituez les moquettes ou autres surfaces moelleuses).
NOTE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse comme par exemple un tapis ou un sol inégal, des mesures inexactes pourraient en résulter ou un message d'erreur pourrait s'afficher
2. Montez sur le pèse-personne lentement et en douceur (ne sautez pas sur le pèse-personne). Tenez-vous debout sans mouvement de va-et-vient et placez vos pieds à une distance égale.
3. Votre poids s'affichera à l'écran; il clignotera trois fois puis déterminera votre poids exact.
4. Descendez du pèse-personne; un nouvel utilisateur peut utiliser immédiatement le pèse-personne par la suite.
5. Le pèse-personne se fermera automatiquement après 8 secondes s'il n'est pas utilisé..

Dépannage

Erreur affichée	Explication
	Indicateur de faiblesse des piles.
	Si le pèse-personne est surchargé – surcharge de poids (397 lb/180 kg), la personne doit descendre du pèse-personne.
	Montez sur le pèse-personne lentement et en douceur (ne sautez pas sur le pèse-personne). Tenez-vous debout sans mouvement de va-et-vient et placez vos pieds à une distance égale.
Écran vide	Remplacez les piles

Recommandations pour l'usage et l'entretien

- Évitez d'utiliser le pèse-personne lorsque la plateforme est mouillée. Elle sera glissante. La sécher immédiatement.
- Évitez un milieu avec une variation de température élevée ou basse extrême.
- Évitez d'exposer le pèse-personne à un choc brutal ou à des vibrations.
- Nettoyez le pèse-personne avec un linge humide et évitez toute infiltration d'eau à l'intérieur.
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le pèse-personne pendant une période prolongée.
- Rangez le pèse-personne en position horizontale.

Garantie de 5 ans

Ce pèse-personne numérique avec plateforme en bambou est garanti 5 ans contre les vices de matériaux et de main-d'oeuvre dans des conditions normales d'utilisation par le propriétaire d'origine. Si le produit devient inutilisable en raison de défauts et requiert une réparation, retourner le produit avec tous ses composants et une preuve d'achat à l'adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport/expédition. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Thermor Ltd.

À l'attention de : Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com



BIOS I Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM

 100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %