

Nous vous remercions pour l'achat de ce thermomètre numérique 5 secondes de BIOS Diagnostics^{MC}. Pour profiter de tous les avantages de cet instrument, veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant de l'employer la première fois, puis rangez-le dans un endroit sûr pour consultation future.

INDICATIONS D'UTILISATION :

Ce thermomètre numérique (227DI) est destiné à mesurer la température corporelle en mode régulier, par voie orale, rectale ou sous l'aisselle. Cet appareil a été conçu pour être réutilisable en clinique ou à domicile, sur des personnes de tous âges.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Une fièvre élevée et persistante nécessite des soins médicaux surtout chez les jeunes enfants. Le cas échéant, consulter un médecin.
- Ce thermomètre renferme des petites pièces qui peuvent causer des dangers d'étouffement. Ne pas permettre aux enfants de prendre leur propre température sans surveillance.
- Garder la pile hors de la portée des enfants, son ingestion peut être nocive.
- **Ne pas** ouvrir le thermomètre sauf pour remplacer la pile.
- Pour éviter d'endommager la sonde, ne pas la plier au-delà d'un angle de 45°.
- L'usage d'un protège-sonde peut résulter d'un écart de 0,1 °C (0,2 °F) de la température réelle.
- **Ne pas** mettre la sonde dans de l'eau bouillante pour la désinfecter.
- **Ne pas** ranger le thermomètre dans la lumière solaire directe ou dans des endroits de chaleur extrême.

°C/°F COMMUTABLE :

Les mesures de température sont accessibles en Celsius ou Fahrenheit (les symboles °C/°F sont situés dans le coin supérieur droit de l'écran). Mettez le thermomètre sous tension en appuyant sur le bouton **On/Off (March/Arrêt)**. Le symbole s'affichera brièvement à l'écran avec rétroéclairage et signal sonore. Puis la dernière mesure mémorisée s'affichera à l'écran. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **On/Off (March/Arrêt)** pendant 3 secondes, °C ou °F s'afficheront, appuyez une fois sur le bouton **On/Off (March/Arrêt)** pour commuter de °C à °F et vice versa.

PRISE DE TEMPÉRATURE :

1. Sélectionnez la méthode de mesure orale, axillaire (sous l'aisselle) ou rectale selon la personne concernée. Nettoyez le thermomètre avec de l'eau et du savon avant utilisation. Lorsque le thermomètre est éteint, maintenez le bouton **On/Off (March/Arrêt)** enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez de nouveau sur le bouton pour faire défiler les modes (orL - oral, udr - aisselle, rct - rectal, bth - bain). Lorsque le mode souhaité s'affiche à l'écran, attendez que le thermomètre s'éteigne automatiquement.
2. Appuyez sur le bouton **On/Off (March/Arrêt)**. Le thermomètre émettra un bip et l'écran affichera : . Il s'agit d'une vérification de fonctionnement indiquant que l'appareil fonctionne correctement. Si une mesure est enregistrée en mémoire, elle s'affichera alors. Immédiatement après, le mode apparaîtra, puis les symboles °C/°F s'afficheront et le « M » disparaîtra. Cela indique que le thermomètre est prêt à être utilisé.

IMPORTANT : ceci ne fait pas référence au niveau de la pile.

3. Pendant la prise de température, le symbole °C/°F clignote tant que la température augmente.
4. Un bip retentira pendant 10 secondes pour indiquer que la température maximale a été atteinte. L'indicateur visuel de température indiquera si la lecture est normale (vert), élevée (jaune) ou correspond à une fièvre (rouge), avec une flèche pointant vers la barre de couleur située sur le dessus de l'écran ACL. Si la température est de 37,8 °C/100 °F ou plus, des bips rapides retentiront et l'écran s'illuminera en rouge pour indiquer une fièvre. Si la température est inférieure à 37,8 °C/100 °F, l'écran s'illuminera en vert.

REMARQUE : l'écran ACL affichera « LO°C » si la température mesurée est inférieure à 32,0 °C/90 °F. Il affichera « HI°C » si la température mesurée est supérieure à 42,9 °C/109,9 °F.

REMARQUE : l'écran ACL affichera « Er 1 » s'il y a un mouvement pendant la mesure.

REMARQUE : l'écran ACL affichera « Er 2 » si la durée de mesure tentée dépasse 15 secondes.

5. Pour prolonger la durée de vie de la pile, éteignez le thermomètre après chaque utilisation en appuyant brièvement sur le bouton **On/Off (March/Arrêt)**. Sinon, l'appareil s'éteindra automatiquement après environ 10 minutes.

UTILISATION ORALE :

- Avant de prendre votre température, évitez de consommer des boissons chaudes ou froides, de fumer ou de faire de l'exercice. Ces activités peuvent modifier la température mesurée par rapport à votre température corporelle normale. Gardez la bouche fermée pendant au moins 5 minutes avant la prise de température.
- Placez l'extrémité de la sonde sous la langue et attendez qu'un bip retentisse. Assurez-vous que les enfants ne mordent pas la sonde.

UTILISATION AXILLAIRE (SOUS L'AISELLE) :

- Essuyez l'aisselle avec une serviette sèche.
- Placez la pointe de la sonde sous le creux de l'aisselle et ramenez le bras le long du corps et attendez le signal sonore.

UTILISATION RECTALE :

- Cette méthode est utilisée couramment chez les bébés, les jeunes enfants et lorsqu'il est difficile d'obtenir une lecture de température par voie buccale ou axillaire (sous l'aisselle).
- Lubrifiez le thermomètre à l'aide d'un lubrifiant personnel hydrosoluble ou de la gelée de pétrole.
- Insérez délicatement la pointe de la sonde sans dépasser 1,3 cm ou ½ po dans le rectum et attendez le signal sonore.

IMPORTANT : En cas de résistance, ne forcez pas la sonde dans le rectum.

QU'EST-CE QU'UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE "NORMALE"?

Une température corporelle "normale" varie d'une personne à l'autre et change selon l'heure de la journée et la région corporelle. Le tableau suivant montre les plages de températures :

	Température de fièvre	Plages de températures
Voie rectale*	Plus de 38,0 °C/100,4 °F	36,6 °C à 38 °C/97,8 °F à 100,4 °F

Voie orale	Plus de 37,5 °C/99,5 °F	35,5 °C à 37,5 °C/95,9 °F à 99,5 °F
Voie axillaire (sous l'aisselle) *	Plus de 37,2 °C/99 °F	36,5 °C à 37,2 °C/97,7 °F à 99 °F

* Définitions de la fièvre selon la Société canadienne de pédiatrie.
IMPORTANT : Lorsque nous sommes en bonne santé, il est recommandé de mesurer notre température corporelle afin d'établir notre température "normale" spécifique.

RAPPEL D'UNE MESURE EN MÉMOIRE :

Ce thermomètre comporte une mémoire et il peut rappeler la dernière mesure prise. Pour obtenir cette information, le thermomètre hors tension, appuyez sur le bouton **On/Off (March/Arrêt)**. L'écran affichera **88.8** puis la dernière mesure stockée en mémoire, laquelle sera effacée dès la prise d'une nouvelle mesure de température.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :

Avant et après chaque usage, nettoyez le thermomètre avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux. Désinfectez avec un tampon d'ouate humidifié d'alcool. Ne plongez jamais le thermomètre dans l'eau chaude ou dans des solutions nettoyantes abrasives.

REMPLACEMENT DE LA PILE :

Lorsque le symbole "  " s'affiche à l'écran, la pile est déchargée et doit être remplacée. Retirez le couvercle du compartiment de la pile situé derrière le thermomètre au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis à tête plate. Jetez la pile déchargée et insérez une pile neuve équivalente (CR2032, 3 V). Veillez à ce que la pile soit positionnée avec la polarité (+) faisant face ou vers le dos du thermomètre. Remettez le couvercle en place.

SPÉCIFICATIONS :

Plage de mesure	32 °C à 42,9 °C (90 °F à 109,9 °F)
Précision de mesure	±0,1 °C, entre 35,5 °C et 42 °C (±0,2 °F, entre 95,9 °F et 107,6 °F)
	±0,2 °C au-dessous de 35,5 °C ou au-dessus de 42 °C (±0,4 °F au-dessous de 95,9 °F ou au-dessus de 107,6 °F) à une température ambiante entre 18 °C et 28 °C (64,4 °F et 82,4 °F)
Référence de température visuelle	Aucune indication : <35,8 °C (<96,4 °F) Vert : 35,8 °C à 37,2 °C (96,4 °F à 99 °F) Jaune : 37,2 °C à 37,8 °C (99 °F à 100 °F) Rouge : >37,8 °C (>100 °F)
Rétroéclairage	Écran rétroéclairé vert : <37,8 °C/100 °F) Écran rétroéclairé rouge : ≥37,8 °C/100 °F)
Environnement opérationnel	Température : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) Humidité relative : 15 % à 95 %
Conditions de stockage et de transport	Température : -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) Humidité relative : 15 % à 95 %
Type de pile	1 pile 3,0 V de type CR2032
Autonomie de la pile	Environ 200 heures

-  Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet instrument, surtout les directives de sécurité et le conserver pour une consultation future.
-  Pièce appliquée de type BF
-  Les piles et les appareils électroniques doivent être jetés selon la réglementation locale applicable, non pas avec les déchets domestiques.

IP22 Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre de plus de 12,5 mm, protection contre les gouttes obliques lors d'une inclinaison maximale de 15 degrés de l'instrument.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Le thermomètre numérique BIOS Diagnostics^{MC} est garanti à vie contre les vices de fabrication pendant toute la durée de vie du propriétaire initial. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage ou une altération.

Garantie de satisfaction à 100 %

Si en tout temps vous n'êtes pas entièrement satisfait du rendement de cet instrument, appelez le service d'assistance téléphonique de BIOS Medical et parlez à une personne du service à la clientèle qui prendra les dispositions nécessaires pour que votre instrument soit testé ou remplacé à votre entière satisfaction.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre thermomètre, veuillez contacter le service **d'assistance téléphonique de BIOS Medical au 1 866 536-2289**.

Si une correction est nécessaire, retournez l'appareil avec toutes ses pièces. Veuillez inclure la preuve d'achat ainsi que 5,00 \$ pour le retour postal et l'assurance. Expédiez l'appareil **prépayé** et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Veuillez inclure vos nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique. Thermor Ltd. testera ou remplacera (au gré de Thermor Ltd.) sans frais, toutes pièces nécessaires pour corriger le défaut de pièce ou de fabrication.

Veuillez allouer 10 jours pour le retour d'expédition.



Paper
Papier



FSC
www.fsc.org



FPO

BIOS Medical
MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %
V.F.