

BIOS living

Pèse-personne analogique et numérique Mode d'emploi SC427



INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'achat du pèse-personne analogique et numérique de BIOS Living. Ce pèse-personne a été conçu avec de l'équipement électronique à la fine pointe de la technologie. Cet appareil de précision comporte une capacité maximale de 396 lb/180 kg, une fonction MARCHE/ARRÊT automatique et une réinitialisation à zéro automatique.

CARACTÉRISTIQUES

- Affichages analogique et numérique
- Écran rétroéclairé bleu
- Alarme de rappel
- Précision jusqu'à 396 lb/180 kg
- MARCHE/ARRÊT automatique
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Piles comprises
- Garantie de 5 ans

MISE EN PLACE DES PILES

1. À la base du pèse-personne, retirer doucement le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérer 3 piles AAA dans le compartiment en respectant la polarité. L'écran ACL se mettra sous tension pendant 5 secondes, puis se mettra hors tension (voir la **figure 1**).
3. Après l'insertion des piles, remettre le couvercle du compartiment des piles.
4. Donner un petit coup au centre du pèse-personne pour mettre sous tension le pèse-personne. Le pèse-personne se mettra en mode d'étalonnage. Lorsque le test d'étalonnage est terminé, vous verrez  à l'écran.

REMARQUE : Soyez conscient que des piles insérées en ne respectant pas la polarité peuvent causer des dommages irréversibles.

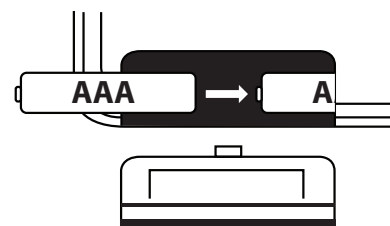


Figure 1

CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE

Pour changer l'unité de mesure de lb à kg, commuter le bouton situé à la partie inférieure du pèse-personne (voir la **figure 2**).



Figure 2

UTILISATION DE VOTRE PÈSE-PERSONNE

1. Déposer le pèse-personne sur une surface nivelée et solide.
2. Monter délicatement sur le pèse-personne et l'appareil se mettra sous tension automatiquement. Dès qu'une mesure est constante, l'affichage clignote 3 fois et montre le poids.
3. Le poids reste affiché à l'écran pendant 5 secondes après être descendu du pèse-personne, puis le pèse-personne se met hors tension.

REMARQUE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface souple, comme sur un tapis ou un plancher inégal, les résultats pourraient être inexacts ou un message d'erreur pourrait s'afficher.

ALARME DE RAPPEL

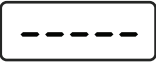
1. Pour activer l'alarme de rappel, appuyez sur le bouton **24H/ALARM** situé derrière le pèse-personne. L'alarme émettra un signal sonore toutes les 24 heures après l'activation du bouton **24 h/ALARM** (voir la **figure 3**).
2. Le symbole de l'alarme  s'affichera à l'écran.
3. Lorsque l'alarme s'active, vous entendrez un signal sonore provenant du pèse-personne pour vous rappeler de prendre votre poids. Dès que vous montez sur le pèse-personne, le signal sonore se désactivera. Si vous ne montez pas sur le pèse-personne lors du signal sonore, il continuera de retentir pendant 25 secondes, puis il se désactivera.



Figure 3

4. Pour désactiver l'alarme de rappel, appuyez sur le bouton **24H/ALARM** encore une fois et le symbole  disparaîtra de l'écran.

DÉPANNAGE

Erreur	Problème	Solution
	La charge des piles est faible.	Remplacer avec de nouvelles piles.
	Surcharge sur le pèse-personne.	Descendre du pèse-personne pour éviter d'endommager l'appareil.
L'aiguille indicatrice ne revient pas à zéro	Le pèse-personne doit être réinitialisé.	Retirer les piles, attendre 10 secondes et réinsérer les piles dans le compartiment des piles du pèse-personne.

SOIN ET ENTRETIEN

- **Éviter** de vous peser si vos pieds sont mouillés afin d'éviter de glisser.
- Maintenir toujours le pèse-personne en position horizontale et ne jamais le mettre sur des surfaces humides ou l'exposer à des températures élevées.
- Éviter de cogner ou d'échapper le pèse-personne.
- **Ne pas** mettre d'articles pesants sur le pèse-personne lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Ne pas** surcharger le pèse-personne, car cela endommagerait le capteur.
- Se servir du pèse-personne avec beaucoup de précautions, car c'est un appareil électronique très précis.
- **Ne pas** plonger le pèse-personne dans l'eau.
- Nettoyer le pèse-personne avec un chiffon humide et doux. **Ne pas** utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Maintenir la surface du pèse-personne sèche et **ne pas** utiliser le pèse-personne sur un plancher glissant.

ENTRETIEN DES PILES

- Si le pèse-personne n'est pas utilisé pendant un certain temps, il est recommandé de retirer les piles pour éviter d'endommager l'appareil.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- **Ne pas** mélanger des vieilles piles avec des nouvelles piles d'une composition différente.
- **Ne pas** chauffer, ni déformer les piles, ni les exposer au feu.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique	3 piles AAA de 1,5 V
Affichage	ACL (à cristaux liquides)
Capacité maximale	396 lb/180 kg
Graduation	0,2 lb/0,1 kg
Poids effectif minimal	11 lb/5 kg

GARANTIE DE CINQ ANS

Le pèse-personne analogique et numérique de BIOS Living est garanti pendant 5 ans contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation par le propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une utilisation abusive, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.

Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com



BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %