



VUE DE FACE

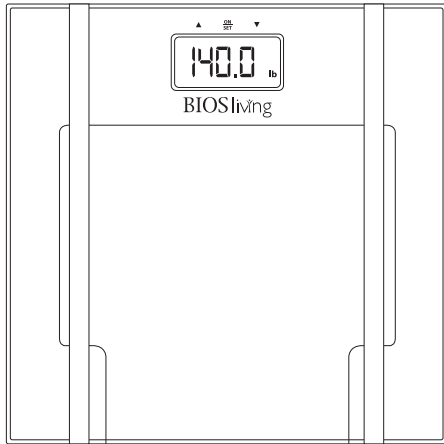

VUE DE DESSUS

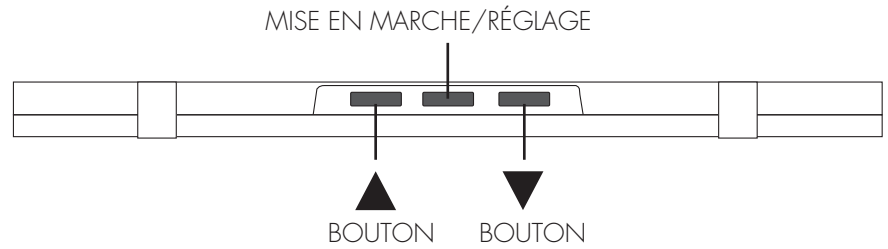

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat du pèse-personne impédancemètre en verre de BIOS Living. Ce pèse-personne a été conçu avec de l'équipement électronique à la fine pointe de la technologie et des capteurs de haute précision pour garantir l'exactitude des mesures. Cet instrument de précision comporte une capacité maximale de 330 lb/150 kg et une fonction MARCHÉ-ARRÊT automatique.

Caractéristiques

- Marche-Arrêt automatique
- Écran ACL rétroéclairé bleu
- Graduations : 0,2 lb/0,1 kg
- Mesure 7 indicateurs :
 - Poids corporel
 - Masse grasse en %
 - Niveau d'hydratation
 - Masse osseuse
 - Masse musculaire
 - Kcal
 - IMC (Indice de masse corporelle)
- Indicateurs de pile faible/surcharge
- Mesures précises jusqu'à 330 lb/150 kg
- LB/KG/ST commutable
- Données stockées pour 10 utilisateurs
- 1 pile CR2032/3 V (comprise)
- Garantie de 5 ans

Mise en place de la pile

Avant d'utiliser l'instrument, retirer la languette en plastique du compartiment de la pile, située derrière le pèse-personne. Remplacer la pile avec une pile CR2032 lorsque le symbole  s'affiche sur l'écran ACL en respectant la polarité. Aussitôt la pile correctement insérée, fermer le couvercle du compartiment de la pile.

NOTE : Soyez conscient qu'une pile insérée en ne respectant pas la polarité peut causer des dommages irréversibles.

Conversion des unités de mesure

Pour changer l'unité de mesure de LB à KG à ST, appuyer sur le bouton des unités de mesure (Unit) derrière le pèse-personne, à côté du compartiment de la pile. **(Se référer au Schéma 1.)**



Schéma 1

Utilisation de votre pèse-personne

1. Déposer le pèse-personne sur une surface nivelée et solide.

NOTE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface souple, comme sur un tapis ou un plancher inégal, les résultats pourraient être inexacts ou un message d'erreur pourrait s'afficher.

2. Appuyer et relâcher le bouton « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET) et attendre que le symbole  s'affiche à l'écran. Pour une mesure précise, monter délicatement sur le pèse-personne pieds nus. Lorsqu'une mesure constante est prise, après quelques secondes, l'écran bloquera et affichera la mesure finale du poids.

Note : Pour une meilleure conductivité en mesurant la masse grasse sur ce pèse-personne, vous devez être pieds nus.

3. Le pèse-personne se mettra hors tension automatiquement après une minute.

Réglage des données personnelles

1. Appuyer sur le bouton « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET) et attendre que le symbole  s'affiche à l'écran.
2. Appuyer de nouveau sur le bouton « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET). Une des mémoires programmées entre P0 to P9 clignotera à l'écran. Aussi, un symbole représentant un homme ou une femme s'afficheront à l'écran.
3. En utilisant les boutons de réglage ▲ ou ▼, atteindre P01 pour introduire les données de la première personne. Appuyer sur le bouton « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET) pour finaliser. Le symbole de l'homme ou de la femme clignotera.
4. En utilisant les boutons ▲ ou ▼ choisir le symbole correspondant et appuyer sur le bouton « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET). La taille s'affichera à l'écran.
5. En utilisant le même bouton, '▲' ou '▼', régler la taille et appuyer sur « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET) pour finaliser ceci. L'âge s'affichera à l'écran.

- En utilisant le même bouton, '▲' ou '▼', régler l'âge et appuyer sur « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET) pour finaliser ceci.
- Attendre que le symbole '00' s'affiche à l'écran. Maintenant vos données ont été saisies avec succès et l'instrument est prêt pour la mesure. Répéter ce processus pour chaque personne qui utilise le pèse-personne.

Pesée et pourcentage de mesure

- Appuyer sur le bouton « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET) pour la mise en marche du pèse-personne.
- Appuyer du nouveau sur le bouton « **MISE EN MARCHÉ/RÉGLAGE** » (ON/SET) et utiliser les boutons de réglage pour choisir le bon utilisateur préprogrammé, entre P0 to P9.
- Après avoir choisi le numéro préprogrammé, monter sur le pèse-personne (vous devez être pieds nus pour une mesure exacte). Éviter de vous balancer. Mettre vos pieds à distance égale, jusqu'à ce que le pèse-personne affiche votre poids.
- Demeurer sur le pèse-personne pendant quelques secondes. Vous verrez les 0000 se déplacer à travers l'écran, car le pèse-personne calcule vos pourcentages.
- Votre masse grasse, niveau d'hydratation, masse osseuse, masse musculaire et l'IMC s'afficheront. Le pèse-personne reprendra le cycle à travers les diverses mesures.

140.2

Votre poids



Pourcentage de la masse grasse



Pourcentage de la masse hydrique



Pourcentage de la masse osseuse



Pourcentage de la masse musculaire

User

IMC

Dépannage

Erreur	Problème	Solution
Err	Surcharge sur le pèse-personne.	Descendre du pèse-personne pour lui éviter des dommages possibles.
Errb	Une erreur s'est produite en prenant la mesure.	Descendre du pèse-personne et attendre quelques minutes avant de l'utiliser de nouveau.
Lo	L'alimentation de la pile est basse.	Retirer la pile, attendre 10 secondes et réinsérer la pile dans son compartiment.
E	Le pèse-personne a été positionné sur une surface instable.	Déposer le pèse-personne sur une surface solide et nivelée.
ErrF	Des données personnelles ont été saisies incorrectement.	Entrer vos données personnelles exactes (âge, taille, sexe).

Soin et entretien

- Garder toujours le pèse-personne dans une position horizontale et lui éviter des conditions humides ou chaudes.
- Éviter de cogner ou de laisser tomber le pèse-personne.
- NE PAS** surcharger le pèse-personne, car cela endommagerait le capteur.
- NE PAS** immerger ce produit dans l'eau.
- Nettoyer le pèse-personne avec un chiffon doux et humide. **NE PAS** utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Garder la surface du pèse-personne sèche et ne pas utiliser l'instrument sur un sol glissant.

Spécifications

Alimentation	1 pile CR2032 (comprise)	Graduation	0,1 kg/0,2 lb
Écran	ACL	Poids effectif minimal	5 kg
Capacité maximale	150 kg/330 lb		


Garantie de 5 ans

Le pèse-personne impédancemètre en verre possède une garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre lors d'un usage normal par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et nécessite une correction, retourner le produit avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou si le produit est soumis à une mauvaise utilisation, à la négligence, à la manipulation brutale ou à des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.

Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

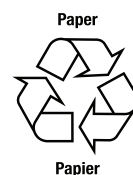

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %