


Project Type Instructions	Date: January 7 2021 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH5821 Item Number: SC423 Designer: Alex Vranjesvic	Revision: A  Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
UPC (For Reference Only)  0 57475 93423 1	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: X N/A:	Artwork is not to be amended or scaled. If any changes are required please send through Thermor office with instructions, and we will amend here and resend artwork through. PLEASE RETURN WITH SIGNATURE 

BIOS living

Pèse-personne à affichage numérique grand format
Mode d'emploi
SC423

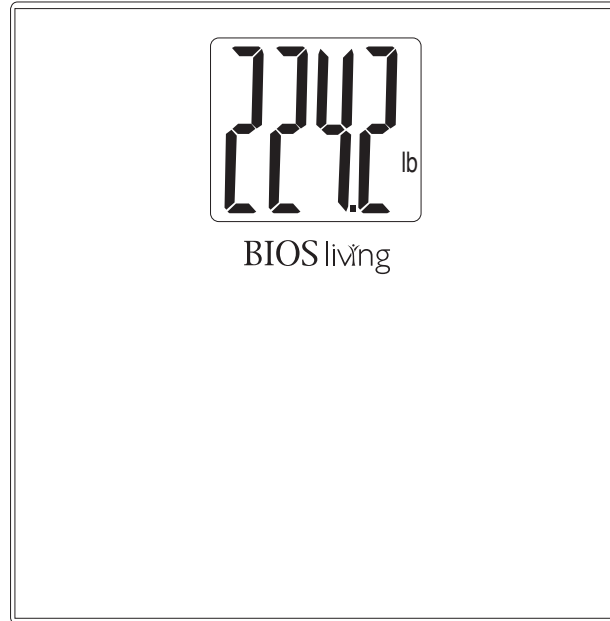

Introduction

Merci pour l'achat du pèse-personne à affichage numérique grand format de BIOS Living. Ce pèse-personne a été développé avec la plus récente technologie électronique. Cet instrument de précision comporte une capacité maximale de 550 lb / 250 kg et il est équipé d'un écran rétroéclairé bleu de grand format.

Caractéristiques

- Marche/arrêt automatique
- Réinitialisation à zéro automatique
- Écran à rétroéclairage bleu (4 po x 3½ po / 10,16 x 8,89 cm)
- LB/KG/ST commutable
- Indicateur de piles faibles / surcharge
- Capacité maximale : 550 lb / 250 kg

Installation des piles (3 piles AAA incluses)


Ouvrir le compartiment des piles derrière le pèse-personne et insérer les piles en respectant la polarité. Soyez conscient que la mise en place des piles de façon erronée peut causer des dommages permanents.

NOTE : Si vous prévoyez ne pas utiliser ce pèse-personne pendant un certain temps, il est utile de retirer les piles avant de le ranger.

Utilisation de votre pèse-personne

- Sélectionner votre unité de mesure préférée en retournant le pèse-personne et en appuyant sur le bouton à l'arrière pour basculer entre kg ou lb.
 - Déposer le pèse-personne sur une surface plane.
- NOTE :** Si le pèse-personne est déposé sur une surface inégale, telle que sur une carpepe ou un plancher inégal, les résultats peuvent être imprécis ou un message d'erreur peut se produire.
- Monter délicatement sur le pèse-personne, positionner vos pieds à distance égale en restant debout jusqu'à ce que la mesure clignote 3 fois.

Unit

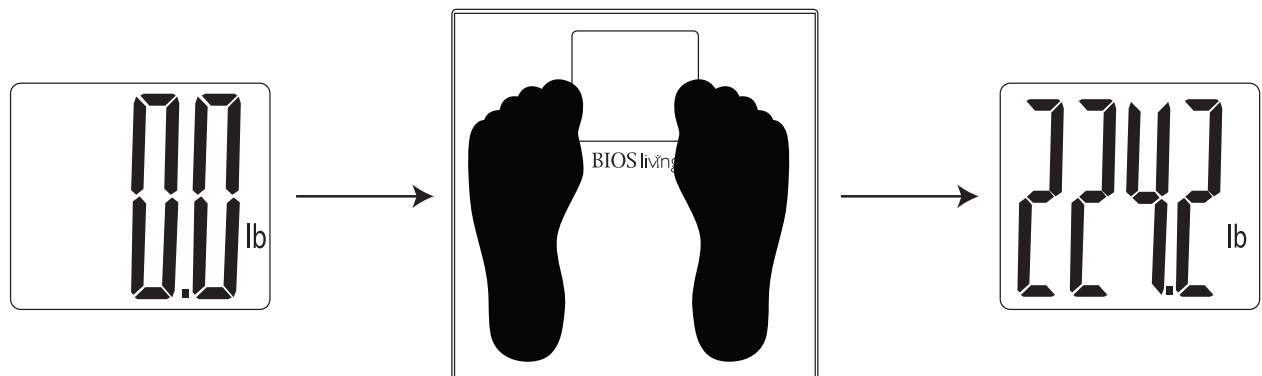

- Le pèse-personne se ferme automatiquement après 15 secondes ou quand la personne descend du pèse-personne.

Dépannage

Erreur	Problème	Solution
	Une erreur s'est produite pendant la mesure	Descendre du pèse-personne et attendre quelques minutes avant de reprendre la mesure. Note : Ne pas utiliser le pèse-personne si votre poids excède la capacité maximale.
	Piles faibles	Retirer les piles, attendre 10 secondes et les réinsérer dans le pèse-personne. Si l'erreur se reproduit, remplacer les piles.

Soins et entretien

- Maintenir le pèse-personne en position horizontale en évitant la chaleur et l'humidité.
- Éviter de soumettre le pèse-personne à des chocs ou des chutes.
- Ne pas surcharger le pèse-personne afin d'éviter des dommages au capteur.
- Ne pas immerger le pèse-personne dans l'eau.
- Nettoyer le pèse-personne avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser des produits chimiques ou abrasifs.
- Maintenir la surface du pèse-personne sèche et ne pas l'utiliser sur un plancher glissant.

Garantie de cinq ans

Le pèse-personne à affichage numérique grand format est garanti 5 ans contre tout défaut de fabrication et de matériaux. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est sujet à une utilisation abusive, à la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit préaffranchi et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.

Attn: Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com

Courriel : support@biosmedical.com