

Pèse-personne analogique de haute qualité - Mode d'emploi SC404

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne analogique de BIOS Living^{MC}. Ce pèse-personne analogique de haute qualité comporte un cadran facile à lire et a une capacité pondérale de 350 lb / 158 kg.

Caractéristiques

- Cadran de 7 po / 17,7 cm facile à lire
- Construction en acier solide
- Plateforme antidérapante facile à nettoyer
- Précision jusqu'à 330 lb / 150 kg

Fonctionnement

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane (évitiez les moquettes ou autres surfaces moelleuses).

REMARQUE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse comme par exemple un tapis, des mesures inexactes pourraient en résulter.

2. Montez sur le pèse-personne lentement et doucement (ne sautez pas sur le pèse-personne). Tenez-vous droit sans mouvements de va-et-vient et placez vos pieds à égale distance; le cadran affichera votre poids.

3. **Réétalonnage :**

Avec votre doigt, ajustez la flèche du cadran (voir la **figure A**) de façon à ce qu'elle pointe vers le «0».

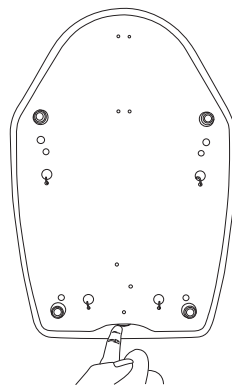


Figure A

Conseils pour l'utilisation et l'entretien

- Évitez de monter sur la plateforme lorsqu'elle est mouillée – elle sera glissante. Gardez le pèse-personne dans un endroit sec.
- Évitez d'infliger des chocs ou des vibrations à l'instrument.
- Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon humide et évitez toute pénétration d'eau à l'intérieur.
- Rangez le pèse-personne en position horizontale.

Garantie de cinq ans

Le Pèse-personne analogique de haute qualité est garanti 5 ans contre tout défaut de fabrication et de matériaux. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est sujet à une utilisation abusive, à la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit préaffranchi et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.

Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com

Courriel : support@biosmedical.com



BIOS | Medical
MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM

TH6774